




1

Klap de voetsteun(en) uit en roteer de rugleuning omhoog.

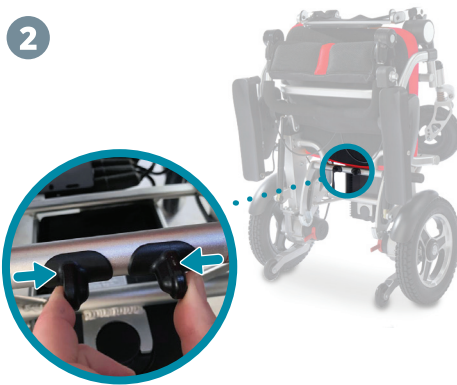

2

Ontgrendel de rolstoel door de schuifstrips op de achterste zittingbuis naar elkaar toe te bewegen.



3

Duw vervolgens de zitting naar beneden. U hoort een klik als de uitgevouwen rolstoel is vergrendeld.



4

Monteer de bedieningsunit met joystick en plug de stekker in de connector.

1



1

Zet de rolstoel uit, de rugleuning omhoog en demonteer eventueel de bedieningsunit met joystick.

2



2

Ontgrendel de rolstoel door de schuifstrips op de achterste zittingbuis naar elkaar toe te bewegen.

3



3

Til vervolgens het voorframe onder de zitting omhoog zodat de ingeklapte rolstoel zelfstandig op de achterwielen en antitip staat. U hoort een klik als deze is vergrendeld.

4



4

Klap de voetsteun(en) omhoog en zet eventueel de rugleuning omlaag.

